

Baxter

SoftPac

KONNEKTOR

SOFTPAC KONNEKTOR

1 BEUTEL VORBEREITEN

Die Schutzkappe vom Konnektor des Beutels entfernen, hierzu mit dem Finger auf die rote Lasche an der Kappe drücken.



Konnektor mit Schutzkappe



Die Schutzkappe des Konnektors entfernen



Konnektor ohne Schutzkappe

2 KONNEKTOR VORBEREITEN

Die Schutzkappe vom SoftPac Konnektor abziehen.



Die Umverpackung öffnen




Konnektor mit Schutzkappe




Konnektor ohne Schutzkappe

3 KONNEKTOR UND BEUTEL VERBINDEN

Die beiden Konnektoren ausrichten und miteinander verbinden.

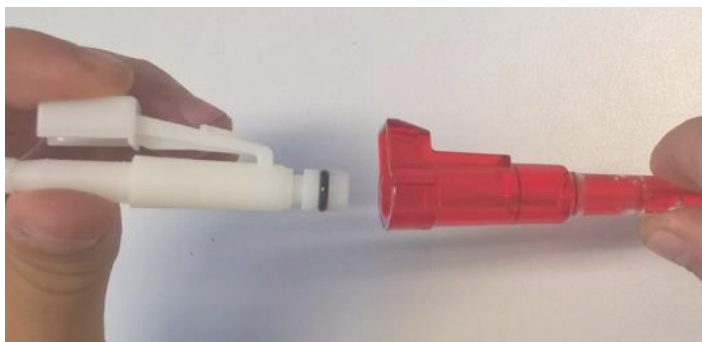

Die Laschen an beiden Konnektoren ausrichten und diese zusammendrücken

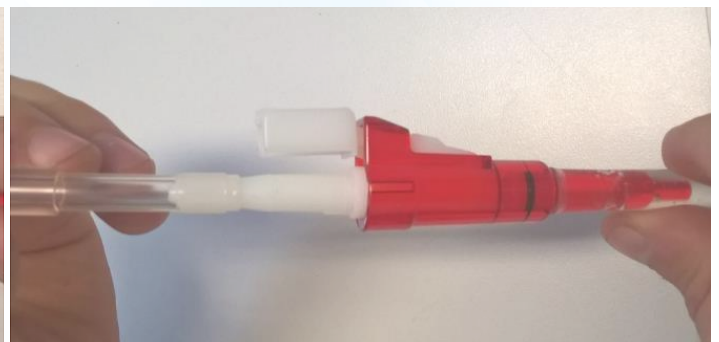

Die weiße Lasche rastet in der Aussparung am roten Konnektor ein



SOFTPAC KONNEKTOR

Für BBraun Geräte: **SoftPac 136**



Für Fresenius Geräte: **SoftPac 136**



Für Nikkiso Geräte: **SoftPac 130**



Die Bilder zum Anschließen von **SoftPac 130** und **SoftPac 136** an Geräte anderer Hersteller (nicht von Baxter) dienen nur der Veranschaulichung. Orientieren Sie sich bei der Entscheidung, welchen **SoftPac** Konnektor Sie verwenden sollten, an den Gebrauchsanweisungen der **SoftPac** Konnektoren. Darin ist für die meisten Geräte und/oder Schlauchsysteme angegeben, welches Hämodialyse-Zubehör verwendet werden kann. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die richtige Zubehör-Konfiguration auszuwählen, die eine Kompatibilität mit den Geräten und/oder Schlauchsystemen für die Hämodialyse gewährleistet.