

Baxter

TIPSTOP

Druckverband



TIPSTOP

Druckverband

WIRKSAM WIE EIN KOMPRESSIONSVERBAND
UND PRAKTISCH WIE EIN PFLASTER


BESCHREIBUNG

TipStop ist ein Druckverband, der aus einem mit Alginat überzogenen Polyamid-Kompressionselement auf einem Klebefilm angebracht ist. **TipStop** wurde speziell entwickelt, um Blutungen nach einer Venenpunktion zu stoppen. Der Wirkungsmechanismus ist eine mechanische Kompression, die durch das Polyamid-Kompressionselement erfolgt und damit die manuelle Kompression verlängert. **TipStop** wird durch Bestrahlung sterilisiert.

INDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG

TipStop ist ein steriler Druckverband für die Blutstillung nach Gefäßpunktionen und wird zur Behandlung von Patienten nach einer Hämodialysebehandlung verwendet.

MERKMALE

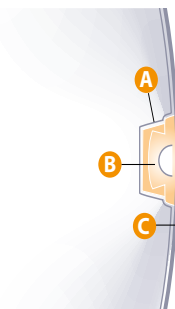

- A. Stabiles PET-Schutzgehäuse.
 - B. Lyophilisiertes Alginat auf einer Kompressionsauflage aus Polyamid
 - C. Hypoallergener Haftfilm
- Der **TipStop** Druckverband ist gammasterilisiert.

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO KARTON
956008 TipStop	Druckverband	200


ANWENDUNG

TipStop ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten und nicht für die Verwendung pädiatrischer Patienten bestimmt.

TipStop ist für die bestimmungsgemäße Verwendung durch das Pflegepersonal oder den Arzt in Kliniken und Dialysezentren vorgesehen.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Druckverband ist steril. Prüfen Sie zunächst sorgfältig, dass die Verpackung intakt und geschlossen ist. Der Druckverband kann nur einmal verwendet werden. Legen Sie den Verband unter aseptischen Bedingungen an.

EMPFEHLUNG: Tragen Sie Handschuhe, um einen Kontakt mit Patientenblut zu vermeiden.

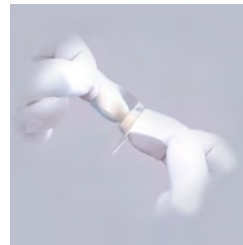

1. Den **TipStop** Verband aus der Verpackung nehmen. Schutzfolie abziehen.



2. Den **TipStop** Verband zwischen Daumen und Mittelfinger nehmen und dabei den Zeigefinger auf die Rückseite des Kompressionselements legen.



3. Die Mitte des Kompressionselements ohne Druck auf der Punktionsstelle platzieren.



4. Kanüle entfernen.



5. Sofort mit dem Zeigefinger etwas Druck auf die Mitte des Verbands über der Punktionsstelle ausüben. **Druckstärke und Haltedauer richten sich nach den Eigenschaften der Punktionsstelle.**



6. Die selbstklebenden Haftflügel lediglich mit festem Druck fixieren. **TipStop ist richtig appliziert, wenn keine periphere Blutung auftritt.** **TipStop** ist nicht als Dauerverband vorgesehen. TipStop unbedingt zwischen 2 und 4 Stunden nach der Applikation entfernen, sobald die Blutstillung erreicht ist.

Für den sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des Druckverband lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Nur für den einmaligen Gebrauch

CE 0459

Notified body: GMED SAS.
Medizinprodukteklasse Is.

MANUFACTURED BY
Adhex Technologies
44 rue de Longvic
21300 Chenove
France

Baxter und TipStop sind Marken von Baxter International Inc. oder deren Tochtergesellschaften

DCH-RC47-230001

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel +49 89 317 010
info_de@baxter.com
www.baxter.de

Österreich

Baxter Healthcare GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien
Tel +43 1 71120 0
renal_austria@baxter.com
www.baxter.at

Schweiz

Baxter AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)
Tel +41 44 908 50 50
info_ch@baxter.com
www.baxter.ch